


MASCARILLA J E N N E R

SA99019001

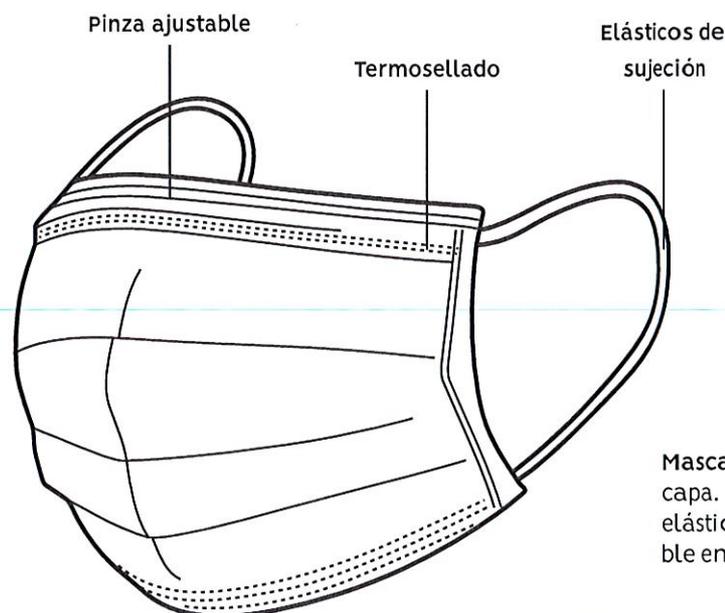

QUIRÚRGICA
TIPO I

Mascarilla Quirúrgica tipo I de triple capa. Acabados termosellados, con elásticos de sujeción y pinza ajustable en la nariz.

Especificaciones

- A prueba de polen y anti-gotitas
- Alta eficacia de filtración de bacterias (BFE) $\geq 95\%$
- Respirabilidad (Presión diferencial): $< 40 \text{ Pa/cm}^2$
- Limpieza microbiana: $\leq 30 \text{ UFC/g}$
- Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE, norma EN14683:2019 + AC:2019 sobre Mascarillas Quirúrgicas de un solo uso
- Certificada en España como TIPO I (Ver Anexo)



2020TM3071


Mascarilla QR AJC

Recomendaciones

- Uso exclusivo en adultos
- Mascarilla desechable de uso personal. No reutilizar.
- Se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h.

Composición

- 1- Non-Woven 25 g/m^2
- 2- Meltblown cloth 25 g/m^2 (densidad $\geq 90\%$)
- 3- Non-Woven 25 g/m^2

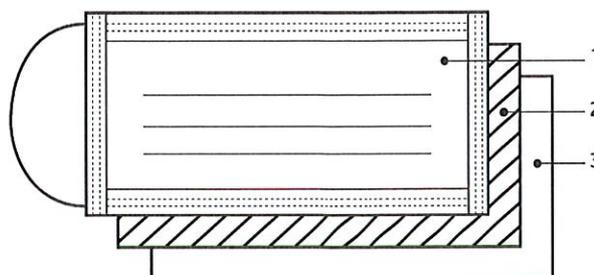

Logística

- Pack 50 uds
- Caja 2500 uds
- Medidas de la caja: 54,5x40x47cm
- Peso: 11,4 kg/caja
- Palet: 40.000 uds

INSTRUCCIONES DE USO

Colocación de la mascarilla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica antes de su manipulación.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla. Sostener la mascarilla desde el exterior y extender los elásticos a ambos lados de las orejas.
3. Bajar la parte inferior de la mascarilla hasta cubrir la barbilla.
4. Ajustar la banda nasal a la nariz y verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Bien sellada y sin molestias respiratorias.
5. Una vez colocada, no tocar la mascarilla con las manos. Si necesita tocar la mascarilla, debe volver a lavarse las manos.

Retirada de la mascarilla:



1. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica.
2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal.
3. Desecharla en un recipiente provisto de una bolsa de plástico.
4. Lavarse las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica.

El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de Sanidad.



RESUMEN / SUMMARY

De los resultados realizados sobre la siguiente referencia:
Of the tests carried out on the following reference:

MASCARILLA QR AJC

Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC: 2019.
Tests according to the standard EN 14683:2019+AC: 2019.

Habiéndose obtenido los siguientes resultados:
Having obtained the following results:

ENSAYOS TESTS		RESULTADOS RESULTS (Promedio \pm DS) (Average \pm SD)
Pto 5.2.2	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)* (%) <i>Bacterial Filtration Efficiency (BFE)* (%)</i>	95,81 \pm 1,65
Pto 5.2.3	Respirabilidad: Presión diferencial* (Pa/cm ²) <i>Breathability: Differential pressure* (Pa/cm²)</i>	17 \pm 0
Pto 5.2.4	Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) <i>Splash resistance pressure (kPa)</i>	Fallan 2 de 32 a 17 kPa <i>Failure 2 of 32 at 17 kPa</i>

Observaciones

Notes

- El resto de ensayos de la norma no indicados en este informe, no han sido evaluados.
- *The rest of the standard tests not indicated in this report, have not been evaluated.*
- DS: Desviación estándar.
- *SD: Standard Deviation.*

///